

plum

WipeClean Ethanol Disinfection med Tensid

Desinfektionsklud

**CE**
2797

Engangsklud til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Rengør og desinficerer i én arbejdsgang.

Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Udviklet til brug i sundheds- og plejesektoren men har også andre anvendelsesmuligheder.

Velegnet til brug på klinikker, tandlæger, dyrlæger, kontormiljøer samt i biler og andre transportmidler.

Bør ikke anvendes på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer.

Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Engangsklud til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder 75% denatureret ethanol (denatureret med IPA) og tensid. Det betyder, at overfladen ikke skal rengøres inden desinfektion. Synligt snavs bør dog fjernes inden brug. Uparfumeret.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er både kryds- og z-foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, foldet og klar til brug.

Ethanol Disinfection med Tensid findes i følgende størrelser:
5261 Mini: 20 x 20 cm. rækker til 0,5 m².

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal og virucidal effekt bl.a. mod Coronavirus og M. norovirus.

CE mærket. Vurderet af CEI til Intermediate level.

Brugsanvisning

Kludene er klar til brug og skal anvendes på synligt rene og tørre overflader. Tag en klud ud af pakken, bearbejd overfladen så den holdes fugtig i henhold til kontakttid for optimal effekt, smid ud. Luk altid emballagen efter brug.

Ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN16615	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN16615	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN14348	Mycobactericidal activity	M. terrae M. avium	1 min (dirty)
EN14476	Limited spectrum virucidal activity	Adenovirus M. norovirus	1 min (clean) 5 min (dirty)

Indhold

Ingrediens	Effekt
Denatureret ethanol	75% Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, 6 måneder fra åbning.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

STORBRITANNIEN

Anvendelses- og miljø sikkerhed

MDR medicinsk udstyr og biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Brugte klude bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt bortskaffes som farligt affald.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Forpakning
12 x 100 stk	5261	5701684526125	5701684526118	Wipes

**Standard tilbehør**

WipeClean Ethanol
Disinfection med Tensid: 4114 Væggholder til WipeClean Mini

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.